



Está formado por un tejido abierto de algodón impregnado con una pasta que contiene 10% de óxido de zinc y un canutillo central de plástico.

TRATANDO UNA ÚLCERA POR PRESIÓN QUE SE DETERIORA RÁPIDAMENTE

- Paciente masculino de aproximadamente 80 años de edad, con deterioro de la movilidad, incontinencia y desnutrición
- Presenta en el sacro una úlcera por presión Categoría III cubierta por una escara, con mal olor y exudado abundante
- Los cambios de apósito se efectuaban al menos una vez al día, y a menudo con mayor frecuencia. Objetivos clínicos
- Mejorar el estado nutricional del paciente y eliminar el tejido necrótico del lecho de la herida
- Encontrar un apósito que no se desprenda, que minimice el olor y gestione el exudado de forma efectiva Encontrando la opción de tratamiento correcta
- Se utilizó ALLEVYN Life como apósito secundario para gestionar el exudado y reducir el mal olor, sin desprenderse
- Se utilizó DURAFIBER™ para contener y absorber una gran cantidad de exudado. Éxito del tratamiento (Semana 6)
- La condición de la herida continuó mejorando, disminuyó su tamaño, se eliminó el mal olor por completo y se gestionó el exudado de forma efectiva
- El estado físico y la calidad de vida del Sr. A mejoraron significativamente.

PRESENTACIONES

Código de producto	Medida	Unidades por caja
66801067	10.3 x 10.3 cm	10
66801068	12.9 x 12.9 cm	10
66801069	15.4 x 15.4 cm	10
66801070	21 x 21 cm	10
66801304	25 x 25 cm	5
66801306	17.2 x 17.5 cm	10
66801307	21.6 x 23 cm	10